

Med optisk ingång

# TV 2500

Kraftfulla trådlösa och digitala hörlurar för TV och musik



## Egenskaper

- 2,4 GHz frekvensen ger ett klart och tydligt ljud
- Flera hörlurar kan användas till samma sändarenhet
- Den digitala tekniken gör att ljudkvaliteten inte störs av väggar, tak, golv eller möbler
- Känslig inbyggd mikrofon för samtalsförstärkning
- På/Av-knapp på hörlurarna för snabb växling mellan TV-ljud och mikrofon
- Upp till 120 dB förstärkning
- Justerbar och användarvänlig volymkontroll
- Balanskontroll för personlig inställning höger-vänster öra
- Användningstid ca 5 tim vid fulladdade batterier
- Laddningstid ca 2,5 tim vid nya/ urladdade batterier
- Automatisk avstängning när ingen ljudsignal är aktiverad
- Lätta hörlurar (stetoclip)
- Omkopplare stereo/mono
- Hörlurarna laddas i sändarenheten
- TV-kabel och adaptrar: optisk kabel, 3,5-6,3mm, 3,5mm-SCART, RCA-3,5mm, 3,5-3,5mm, extern mikrofon (ingår)
- 2 laddningsbara batterier (ingår)
- Uttag på sändarenheten för laddning av reservbatteriet (ingår)
- Nätdrift (sändaren/laddaren)

## Lätta hörlurar med klart ljud!

Njut av ett TV-program utan att behöva anstränga dig för att höra bra! Med TV 2500 trådlösa hörlurar kan du lyssna länge på TV, CD, MP3 eller annan ljudkälla. En produkt för dig som har nedsatt hörsel, men inte använder hörapparat. Du slipper störa resten i familjen eller dina grannar – ljudet skickas trådlöst från TV-n till hörlurarna och du kan lyssna till ett kristallklart ljud utan att störas av omgivningen. Två hörlurar kan användas till samma sändarenhet. Båda laddas i samma sändarenhet, dock ej samtidigt.

Sändaren, som också används som laddstation, ansluts enkelt till ett ljuduttag i din TV eller ljudanläggning och skickar ljudet trådlöst till hörlurarna. Ett flertal olika adaptrar medföljer, inkl. optisk kabel. Efter användning ställer du tillbaka lurarna i sändaren/laddaren.

Hörlurarna använder 2,4 GHz frekvensen som ger ett klart och tydligt ljud på ett avstånd på upp till 30 m från TV-n/ljudanläggningen. Den digitala tekniken bidrar också till att ljudkvaliteten inte försämras av väggar, tak golv eller möbler.

Den känsliga inbyggda mikrofonen gör det möjligt att höra vad som sägs i närområdet när du vill växla mellan ljudkällan (t ex TV-n/musikspelaren) och omgivningen. Du växlar enkelt genom att använda mikrofonknappen som sitter på framsidan av hörlurarnas mottagare. Då stängs ljudkällan av och du kan höra vad någon bredvid dig säger.

Sändaren kan ställas in på mono eller stereo. Med stereoinställningen kan du öka volymen upp till 120 dB och få klart och rent ljud i dina öron. Med den justerbara volymkontrollen och balanskontrollen ställer du in lurarna helt efter ditt personliga behov.

När ljudsignalen upphör från ljudkällan, känner mottagaren av detta och hörlurarna stängs av automatiskt, vilket ökar batteriets livslängd.

Om det inte finns ljuduttag på TV-n kan man fästa den medföljande mikrofonen på TV-ns högtalare.

# TV 2500



## Produktöversikt

Ingångar:	Audio 3,5mm Optisk MIC = mikrofon (för extern mikrofon)	} på sändaren på mottagaren
Omkopplare:	Stereo/Mono	
Frekvens:	2,4 GHz digital	
Räckvidd:	ca 30 m	
Nätadapter sändare	5 VDC, 550 mA	
Användningstid:	Fulladdade batterier upp till 5 tim	
Laddningstid:	Ca 2,5 tim vid urladdade/1:a laddning batterier	

Storlek:	Hörlurar/mottagare:	140 x 25 x 220 mm (BxDxH)
	Laddstation/sändare:	130 x 130 x 40 mm (BxDxH)
Vikt:	Hörlurar/mottagare:	ca 65 g
	Laddstation/sändare:	ca 145 g

Färg Svart/silver

Art nr	Beskrivning
252500	TV 2500, trådlöst headset för TV, 2,4 GHz
252501	TV 2500-1, extra hörlurar
251049	TV 2500, extra öronproppar

### Delar i förpackningen

Hörlurar/mottagare

Laddstation/sändare

Nätadapter

Bruksanvisning

TV-kabel, adapttrar: optisk, RCA-3,5 mm, 3,5-3,5 mm, 3,5 mm-SCART, 3,5-6,3 mm

Extern mikrofon

2 par extra kuddar, i olika storlekar, till hörlurarna

2 laddningsbara batterier, 600 mAh



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som kan laddas ned från [www.edin.se](http://www.edin.se), Dokumentarkiv. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via [support@edin.se](mailto:support@edin.se).

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö  
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18  
Fax 08-767 18 20

E-post [info@edin.se](mailto:info@edin.se)  
Internet [edin.se](http://edin.se) • [univox.eu](http://univox.eu)