



Trådlösa digitala hörlurar, art nr 252500

Snabbmanual

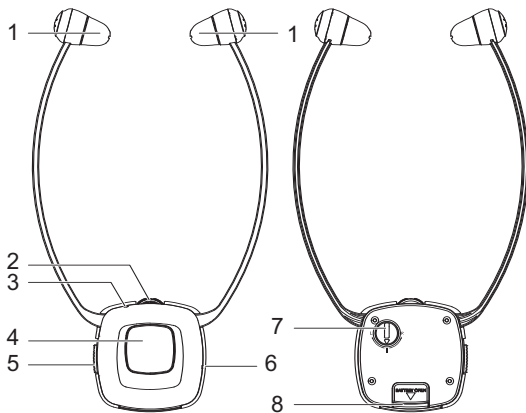

Mottagare

1. Öronproppar höger/vänster
2. Volymkontroll
3. Driftsindikator
4. Mikrofonknapp för att höra ljud i omgivningen
5. På-/Av
6. Mikrofon
7. Balans (vänster/höger)
8. Batteri

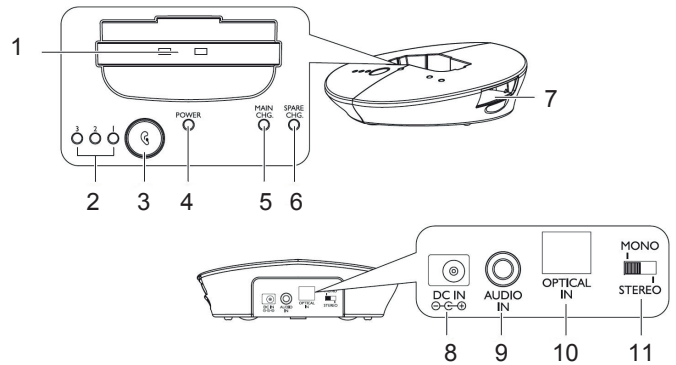


Sändare

1. Laddningsfack
2. Tonkontrollindikator
3. Tonkontroll
4. Batteri-indikator
5. Laddningsindikator hörlur
6. Laddningsindikator extrabatteri
7. Laddningsfack extrabatteri
8. Uttag för nätadapter
9. Audio-ingång (3,5 mm)
10. Optisk ingång
11. Mono/Stereo omkopplare

Anslut sändaren

1. Anslut nätadaptern i uttaget på sändarens baksida.
2. Sätt nätadaptern i ett vägguttag.
3. Anslut sändaren till önskad ljudkälla (TV, ljudanläggning etc.) via den analoga ljudingången "audio in" eller den digitala "optical in".



För de olika anslutningsmöjligheterna (TV, ljudanläggning etc.) ingår optisk kabel, flera adaptorer och en mikrofon som kan sättas fast på högtalaren. Den gröna batteri-indikatorn blinkar så snart det finns nätspänning och lyser med ett konstant sken när ljudkällan är aktiv.

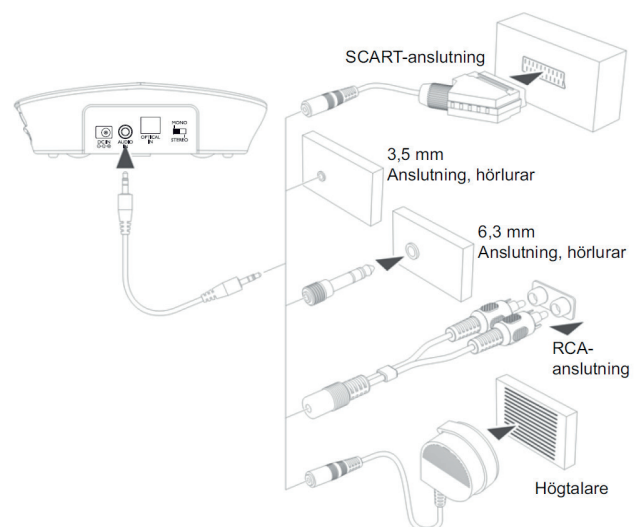

Sätta på mottagaren/hörlurarna

Sätt i och ladda batterierna

1. Sätt i batteriet i batterifacket på mottagaren/hörlurarna. Det kan bara sitta åt ett håll, vänd på det om det inte går in.
2. Ladda batteriet fullt innan du använder produkten första gången. Stäng av mottagaren när den inte används (läge OFF). Placera mottagaren i sändarens laddningsfack så som bilden visar. Laddningsindikatorn (5) lyser rött medan laddningen av batteriet pågår (ca 2,5 timmar). När batteriet är fulladdat lyser laddningsindikatorn grönt.
3. Skjut in extrabatteriet i sändarens laddningsfack så som bilden visar. Laddningsindikatorn (6) lyser rött under tiden batteriet laddas (ca 2,5 tim.). När batteriet är fulladdat lyser laddningsindikatorn grönt.

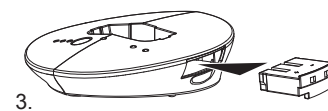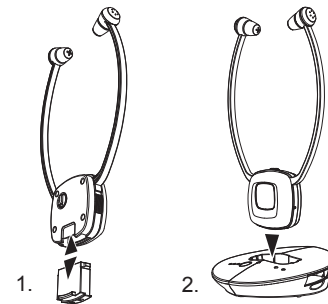

Drift

OBS!

Hög ljudvolym skadar hörseln!

Med dessa hörlurar kan en högre ljudvolym ställas in än med konventionell utrustning. Detta kan leda till hörselskador hos människor med god hörsel och bland barn.

- Ställ alltid volymkontrollen på lägsta nivå innan du använder hörlurarna. Höj sedan försiktigt tills du uppnår önskad volymnivå.
- Undvik att utsätta dig för hög volym under en längre tid.

1. Sätt på TVn/ljudanläggningen som är kopplad till sändaren. Den gröna lampan tänds.
2. Ställ På/Av-knappen på mottagaren i läge "ON".
3. Böj isär mottagarens byglar och sätt in öronpropparna i öronen. Tryck i öronpropparna försiktigt i öronen så att de sitter bekvämt. Var noga med att öronpropparna kan röras uppåt, nedåt och sidledes, så att öronpropparna kan tryckas djupt in i öronen. Därigenom förbättras ljudkvaliteten och ljudvolymen.
4. Ändra ljudinställningarna när så behövs.

OBS!

När batteriet är nästan tomt hörs 3 korta pip med 1 minuts mellanrum i hörlurarna. Utrustningen stängs sedan av efter cirka 5 minuter.

Mikrofonknappen

Den inbyggda mikrofonen på sidan av mottagaren fångar upp ljudet från omgivningen. För att sätta på mikrofonen trycker man på mikrofonknappen (4) på framsidan av mottagaren. Indikatorlampan växlar från grönt till rött och man hör 2 korta pip i hörlurarna. När mikrofonen är påslagen kan man höra ljuden från omgivningen bättre, t.ex. dörrklockan, telefonen eller din samtalspartner. Var noga med att mikrofonöppningen, på sidan, inte är övertäckt med något.

För att stänga av mikrofonen trycker man på mikrofonknappen ytterligare en gång. Indikatorlampan växlar tillbaka till grönt och man hör ljudet från TVn, radion, eller den ljudkälla som sändaren är kopplad till.

Viktigt - garanti!

Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig användning/inkoppling/montering eller underhåll. Vänligen läs hela bruksanvisningen innan ni använder produkten.